

Notice d'utilisation Revamil® Baume apaisant et cicatrisant

Produit

Revamil® Baume
Tube Aluminium de 15 g

Ingrédients

Arachis oleum, cera alba, glyceryl oleate, mel, aqua, rosa oleum.

Propriétés

Revamil® Baume est un onguent dermoprotecteur apaisant et cicatrisant contenant 25% de miel pur. Le miel contenu dans Revamil® Baume présente un forte teneur en enzymes, dont la glucose oxydase. En milieu humide, la glucose oxydase produit de petites quantités de peroxyde d'hydrogène. Grâce au miel, une partie de la sérosité des plaies se mélange à l'onguent Revamil® Balm et forme ainsi une couche de protection antibactérienne. Revamil® Baume ne contient aucun résidu de pesticides, insecticides ou agents de conservation.

Indications

Revamil® Baume a été conçu en première intention pour le soin des zones péri-lésionnelles des plaies chroniques. Revamil® Baume convient également à tous les âges pour :

- Les plaies de surfaces: dermabrasion, irritations, prurits, peaux eczémateuses.
- Crevasses, gerçures d'allaitement.

Mode d'emploi

1. Dévissez le bouchon blanc du tube.
2. Retournez le bouchon.
3. Ouvrez le tube en appuyant la pointe du bouchon dans l'ouverture du tube.
4. Lavage de la plaie à l'eau et au savon doux ou sérum physiologique.
5. Appliquer une couche de Revamil® Baume sur la surface de la plaie ou sur la peau abîmée.
6. Si nécessaire, couvrir la plaie avec une compresse de gaze.
7. Appliquer 2 à 3 fois par jour jusqu'à guérison.

Effets secondaires

- Pendant les premières minutes suivant l'application, le produit peut entraîner une légère sensation de picotement. Celle-ci est probablement due au faible pH et à la haute osmolarité du miel et n'a aucun effet sur l'efficacité du produit.
- En cas d'effets secondaires inattendus après utilisation, veuillez consulter votre médecin ou le fabricant. Les effets secondaires peuvent occasionner des désagréments pour le patient.

Précautions d'usage

- Ne pas utiliser si le tube est endommagé car cela peut entraîner une contamination du produit avec des bactéries et une infection de la plaie. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Toujours replacer le bouchon sur le tube après utilisation. Un tube ouvert pourrait entraîner une contamination avec des bactéries et une infection de la plaie. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Veiller à ce que le tube n'entre pas directement en contact avec la surface de la plaie. Le contact direct entre la plaie /peau et le tube (ouvert) pourrait entraîner une contamination avec des bactéries et une infection de la plaie. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Ne pas utiliser ce produit plus de 30 jours de suite. Le traitement pendant plus de 30 jours de suite pourrait entraîner des désagréments pour le patient, comme une irritation et/ou une légère douleur.
- Utiliser le contenu sous 3 mois après l'ouverture du tube. Une utilisation plus longue pourrait entraîner une moindre efficacité et une contamination du produit. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Ne pas traiter différents patients avec le même tube, car cela peut entraîner une contamination croisée avec des bactéries et une infection de la plaie. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Ne pas utiliser le produit après expiration de la date car cela peut entraîner une moindre efficacité du produit et des désagréments pour le patient.
- N'utilisez pas d'objets pointus pour ouvrir le tube, car des morceaux du film protecteur pourraient se détacher et provoquer une gêne pendant l'utilisation du produit.

Contre-indication

Ne pas utiliser le produit si le patient est sensible à l'un des ingrédients de l'onguent (voir Ingrédients). La forte sensibilité à l'un des ingrédients de l'onguent peut entraîner des rougeurs, une irritation et éventuellement une légère douleur.

Conditions de stockage et de conservation

- Un tube ouvert peut être utilisé pendant trois mois.
- A conserver entre 4 °C et 30 °C.
- La date limite d'utilisation est indiquée sur un des rebats de l'étui.

Fabricant:



Bfactory Health Products B.V.
Remmerden 58, 3911 TZ Rhenen (NL)
www.revamil.com



Exploitant:

Laboratoire MELIBIOTECH
Z2170 Plouagat
www.melibiotech.com