

Notice d'utilisation Revamil® Tulle

Produit et présentations

Revamil® tulle est une compresse imprégnée de miel médical pour les soins des plaies aiguës et brûlures
Présentations : 3 modèles : (5x5) (8x8) (10x20)

Description et propriétés du produit

Le Revamil® Tulle est une compresse stérile en polyacétate de cellulose à mailles serrées imprégnée de miel médical cicatrisant Revamil®. Le miel médical cicatrisant Revamil® est un miel 100% pur produit dans des conditions contrôlées qui lui garanti d'être exempt de pesticides et sa qualité est constante et reproductible.

Revamil® Tulle supprime et protège contre les risques d'infections par sa protection antibactérienne. Apaise la douleur, accélère le processus de cicatrisation. Revamil® Tulle est un pansement stérile non adhésif qui maintient l'humidité à pH acide au niveau de la plaie.

Indications

Revamil® Tulle est indiqué pour tous les types de plaies aiguës :

- Brûlures thermiques du 1er et 2ème degré ou radioinduites
- Plaies traumatiques : abrasions, lacerations....
- Plaies chirurgicales : greffes, sutures....

Protocole de soin

1. Nettoyer la plaie à l'eau et du savon au sérum physiologique si besoin.
2. Appliquer la compresse directement sur la zone concernée.
3. Retirer la compresse et la remplacer tous les deux jours par une nouvelle.

Effets secondaires

- Dans certains cas, le miel cicatrisant Revamil® peut entraîner une légère sensation de picotement pendant quelques instants : dans ce cas bien humidifier la plaie.
- En cas d'effets secondaires inattendus après utilisation, veuillez consulter votre médecin ou le fabricant. Les effets secondaires peuvent occasionner des désagréments pour le patient.

Contre-indications

- Ne pas utiliser le produit si le patient est allergique ou hypersensible au miel. Une réaction allergique ou d'hypersensibilité peut entraîner des rougeurs, une irritation et éventuellement une légère douleur de la peau ou de la plaie.
- Ne convient pas aux plaies sèches d'origine artérielle, de très fortes douleurs sont ressenties par le patient quelques minutes après l'application.




Précautions particulières

- Ne pas utiliser si le miel s'écoule du conditionnement intérieur.
- Une fuite peut entraîner une contamination du produit avec des bactéries et une infection de la plaie. En raison de la protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Ne pas utiliser si le conditionnement (sachet) n'est pas hermétiquement scellé. Si le conditionnement n'est pas hermétiquement scellé, il est possible que le pansement ne soit pas stérile et cela peut entraîner une infection de la plaie. En raison de la haute protection antibactérienne du miel, le risque d'infection de la plaie est considéré comme étant très faible.
- Ne pas utiliser ce produit plus de 30 jours de suite. Le traitement pendant plus de 30 jours de suite pourrait entraîner des désagréments pour le patient, comme une irritation et/ou une légère douleur.
- Ne pas réutiliser un pansement déjà utilisé. La réutilisation d'un pansement peut entraîner une perte d'efficacité du miel, une contamination du produit et une contamination ou une infection de la plaie.
- Ne pas restériliser un conditionnement ouvert. La restérilisation d'un conditionnement ouvert peut entraîner une perte d'efficacité du miel, une contamination du produit et une contamination ou une infection de la plaie.
- Ne pas utiliser le produit après expiration de la date car cela peut entraîner une moindre efficacité du produit et des désagréments pour le patient.

Conservation

Conservé entre 10 °C et 30 °C.

Instructions d'utilisation:

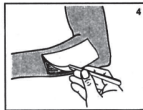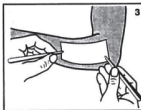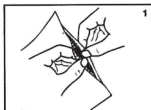

Manufacturer / Fabricant / Herstellungsfirma / Prodotto da /Fabricante:

 Blafactory Health Products B.V.
Remmerden 58, 3911 TZ Rhenen (NL)


0344

Distributeur / Distributor / Vertailer / Distribuito da / Distribuidor:

F: Laboratoire MELBIOTECH, Le Mogoro, 22170 Plouagat,
www.melbiotech.fr / www.revamil.com

B56/0121